

Satzkachel einrichten

Folgen Sie den Schritten für „Satzkachel einrichten“ in Express Me.

Sehen Sie sich das Video an, folgen Sie den Schritten oder öffnen Sie das vollständige Transkript als Textversion der Anleitung.



Scannen, um das Video anzusehen

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1

Bearbeitungsmodus öffnen

Klicke oben rechts auf die Schaltfläche und bestätige **Bearbeitung starten**.

2

Das Kachelmenü öffnen

Klicke auf die drei Punkte der Kachel, die du ändern möchtest, zum Beispiel der Kachel **Ja**.

3

Einen Satz eingeben oder Sprache aufnehmen

Wähle eine Option im Menü. Gib einen Satz ein, zum Beispiel „ja, tatsächlich“, oder nimm selbst Sprache auf.

4

Änderungen speichern

Klicke oben rechts auf **Speichern**.

5

Bearbeitungsmodus verlassen und die Kachel testen

Verlasse den Bearbeitungsmodus und klicke auf die Kachel, um den gesprochenen Satz zu hören.

Vollständiges Transkript

▼ Vollständiges Videotranskript lesen

Hallo zusammen, ich bin Rick von ExpressMe.

Und heute zeige ich euch, wie ihr einen Satz für eine Kachel einrichten könnt, sodass ein Satz statt des Wortes gesprochen wird.

Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Kachel Ja klicke, hören wir Folgendes. Aber wir können hier auch etwas anderes einrichten.

Gehen wir in den Bearbeitungsmodus. Klickt oben rechts, dann sagt okay, Bearbeitung starten. Und dann können wir auf die drei Punkte von Ja klicken.

Dann sehen wir, dass es mehrere Optionen gibt. Wir können einen Satz eingeben oder wir können selbst Sprache aufnehmen. Jetzt sagt man zum Beispiel ja, tatsächlich.

Und dann können wir oben rechts einfach speichern. Wenn wir den Bearbeitungsmodus verlassen und jetzt auf Ja klicken, hören wir Folgendes.

Das ist natürlich ein sehr einfaches Beispiel, aber man kann hier alles Mögliche machen, sodass zum Beispiel auch euer eigener Name gesprochen wird oder längere Sätze gesprochen werden.