

تنظیم صدای خودتان

دستورالعمل‌های گام به گام تنظیم صدای خودتان در Express Me.

ویدیو را تماشا کنید، مراحل را دنبال کنید یا متن کامل پیاده‌سازی شده را برای نسخه متنی دستورالعمل‌ها باز کنید.



برای تماشای ویدیو اسکن کنید

دستورالعمل‌های گام به گام

1

وارد حالت ویرایش شوید

با کلیک روی شروع ویرایش وارد حالت ویرایش شوید.

2

منوی خانه را باز کنید

روی سه نقطه خانه‌ای که می‌خواهید تغییر دهید (مثلاً «سلام») کلیک کنید و ضبط صدای خودتان را انتخاب کنید.

3

صدا را ضبط کنید

روی دکمه ضبط کلیک کنید، کلمه یا عبارت را بگویید و ضبط را متوقف کنید.

4

ضبط را بررسی و برش بزنید

به ضبط گوش دهید و در صورت نیاز آن را برش بزنید.

5

تأیید و ذخیره

روی تأیید ضبط کلیک کنید، سپس ضبط را از بالا ذخیره کنید یا از حالت ویرایش خارج شوید.

متن کامل پیاده سازی شده

▼ متن کامل ویدیو را بخوانید

سلام به همه، من ریک از ExpressMe هستم.

نشانتان می‌دهم چطور صدای خودتان را ضبط کنید تا اپلیکیشن به جای شما آن را بخواند.

مثلاً اگر اینجا روی سلام کلیک کنیم، این را می‌شنویم. سلام. اما دوست دارم آن را با صدای خودم بسازم.

خوب، پس به حالت ویرایش می‌روم. با کلیک روی شروع ویرایش، می‌توانیم روی سه نقطه سلام کلیک کنیم. و بعد می‌بینیم: ضبط صدای خودتان.

وقتی روی آن کلیک می‌کنم، این پنجره باز می‌شود. و خیلی ساده می‌توانیم ضبط را شروع کنیم. الان این کار را می‌کنم. سلام.

بعد ضبط را متوقف می‌کنم و می‌توانیم به آن گوش دهیم. سلام. خوب، در صورت تمایل می‌توانیم کمی برشش بزنیم تا بهتر شود. سلام. خوب، عالی به نظر می‌رسد.

بعد روی تأیید ضبط کلیک می‌کنیم. و می‌توانیم از بالا ذخیره‌اش کنیم. یا بگذارید فقط از حالت ویرایش خارج شویم.

و حالا که روی سلام کلیک می‌کنم، این را می‌شنویم. سلام. خوب، و این صدای خودم است. به همین سادگی.