

Configura tessera frase

Segui i passaggi per «Configura tessera frase» in Express Me.

Guarda il video, segui i passaggi oppure apri la trascrizione completa per leggere le istruzioni in formato testuale.



Scansiona per guardare il video

Istruzioni passo passo

1

Aprire la modalità di modifica

Fai clic sul pulsante in alto a destra e conferma **Avvia modifica**.

2

Aprire il menu della tessera

Fai clic sui tre puntini della tessera che vuoi modificare, ad esempio la tessera **sì**.

3

Digitare una frase o registrare la voce

Scegli un'opzione dal menu. Digita una frase, ad esempio «Sì, davvero», oppure registra la tua voce.

4

Salvare le modifiche

Fai clic su **Salva** in alto a destra.

5

Uscire dalla modalità di modifica e testare la tessera

Esci dalla modalità di modifica e fai clic sulla tessera per ascoltare la frase pronunciata.

Trascrizione completa

▼ Leggi la trascrizione completa del video

Ciao a tutti, sono Rick di ExpressMe.

E oggi vi mostrerò come impostare una frase per una tessera, in modo che venga pronunciata una frase invece della parola.

Se per esempio clicco sulla tessera sì ora, sentiamo quanto segue. Ma possiamo anche impostare qualcosa di diverso qui.

Andiamo in modalità di modifica. Cliccate in alto a destra, poi dite ok, avvia modifica. E poi possiamo cliccare sui tre puntini di sì.

Poi vediamo che ci sono diverse opzioni. Possiamo compilare una frase o possiamo registrare la voce noi stessi. Ora dici per esempio sì, davvero.

E poi possiamo semplicemente salvare in alto a destra. Quando usciamo dalla modalità di modifica e quando ora clicchiamo su sì, sentiamo quanto segue.

Questo è un esempio molto semplice naturalmente, ma potete fare di tutto con questo, in modo che per esempio il vostro nome venga pronunciato o vengano pronunciate frasi più lunghe.