

Eigen spraak instellen

Stapsgewijze instructies voor Eigen spraak instellen in Express Me.

Bekijk de video, volg de stappen of open het volledige transcript voor een tekstversie van de instructies.



Scan om de video te bekijken

Stapsgewijze instructies

1

Bewerkingsmodus starten

Start de bewerkingsmodus door op **Bewerken starten** te klikken.

2

Het tegelmenu openen

Klik op de drie puntjes van de tegel die je wilt aanpassen (bijvoorbeeld "Hallo") en kies **Zelf spraak opnemen**.

3

De audio opnemen

Klik op de opnameknop, spreek het woord of de zin uit en stop de opname.

4

De opname beluisteren en bijknippen

Luister de opname terug en knip deze indien nodig bij.

5

Bevestigen en opslaan

Klik op **Opname bevestigen** en sla de opname vervolgens bovenin op of verlaat de bewerkingsmodus.

Volledig transcript

▼ Lees het volledige videotranscript

Hallo allemaal, ik ben Rick van ExpressMe.

Ik ga je laten zien hoe je je eigen spraak kunt opnemen zodat de app dat kan uitspreken voor je.

We hebben hier als we bijvoorbeeld klikken op Hallo, waar we het volgende horen. Hallo. Maar daar wil ik graag mijn eigen stem van maken.

Nou, vervolgens ga ik naar de bewerkingsmodus. Door bewerken starten te klikken, dan kunnen we op de drie puntjes klikken van Hallo. En vervolgens zien we, hey, zelf spraak opnemen.

Als ik daar vervolgens op klik, krijg ik deze pop-up. En vervolgens kunnen we heel simpelweg starten met het opnemen. Dat ga ik dus nu even doen. Hallo.

Vervolgens stop ik de opname en kunnen we hem eigenlijk terug luisteren. Hallo. Nou, dan kunnen we eventueel nog een beetje bijknippen zodat het wat beter klinkt. Hallo. Nou, dat klinkt perfect.

Dan doen we vervolgens bevestigd opname. En dan kunnen we hem opslaan even bovenin. Of laten we de bewerkingmodus even verlaten.

En vervolgens als ik nu klik op Hallo, horen we het volgende. Hallo. Nou, en dat is mijn eigen stem. Zo simpel is het.