

Dodaj kafelek słowa

Szczegółowe instrukcje dodawania kafelka słowa w Express Me.

Obejrzyj film, postępuj zgodnie z krokami lub otwórz pełną transkrypcję, aby przeczytać wersję tekstową instrukcji.



Zeskanuj, aby obejrzeć film

Instrukcje krok po kroku

1

Włącz tryb edycji

Przejdź do ustawień za pomocą ikony w prawym górnym rogu, włącz **Tryb edycji** i wróć do ekranu głównego.

2

Dodaj kafelek słowa

Kliknij **Dodaj kafelek** na dole ekranu i wybierz opcję dodania kafelka słowa (zamiast kategorii).

3

Wpisz nazwę kafelka

Wpisz nazwę nowego kafelka (np. „banan”) i potwierdź ją. Wybierz, czy chcesz zrobić zdjęcie, czy wybrać je z galerii.

4

Ustaw zdjęcie i pozycję

W razie potrzeby przytnij zdjęcie, wybierz żądaną pozycję nowego kafelka i potwierdź swoje wybory.

Zapisz i użyj kafelka

Aplikacja zapisuje kafelek automatycznie. Po załadowaniu dotknij kafelka, aby go odsłuchać.

Pełna transkrypcja

▼ Przeczytaj pełną transkrypcję filmu

Pokażę Ci, jak dodać kafelek słowa w aplikacji.

Na początek przejdź do ustawień, naciskając ikonę w prawym górnym rogu, i włącz tryb edycji. Następnie wróć do ekranu głównego.

Na dole pojawi się przycisk „Dodaj kafelek”. Naciśnij go i wybierz opcję dodania kafelka słowa (zamiast kategorii).

Wpisz nazwę kafelka, który chcesz utworzyć — w tym przykładzie „banan” — i potwierdź nazwę. Pojawi się teraz wybór: zrobić zdjęcie lub wybrać istniejące zdjęcie z galerii.

Po zrobieniu lub wybraniu zdjęcia możesz je w razie potrzeby przyciąć. Następnie wybierz żądaną pozycję nowego kafelka i potwierdź swoje wybory.

Aplikacja zapisze teraz wszystko, a gdy nowy kafelek zostanie załadowany, możesz go używać i odsłuchiwać. Tak łatwo można dodać osobisty kafelek słowa do aplikacji!