

Ustaw kafelek zdania

Szczegółowe instrukcje ustawiania kafelka zdania w Express Me.

Obejrzyj film, postępuj zgodnie z krokami lub otwórz pełną transkrypcję, aby przeczytać wersję tekstową instrukcji.



Zeskanuj, aby obejrzeć film

Instrukcje krok po kroku

1

Włącz tryb edycji

Kliknij przycisk w prawym górnym rogu i potwierdź **Rozpocznij edycję**.

2

Otwórz menu kafelka

Kliknij trzy kropki na kafelku, który chcesz zmienić, na przykład na kafelku **tak**.

3

Wpisz zdanie lub nagraj mowę

Wybierz opcję z menu. Wpisz zdanie, na przykład „tak, właśnie tak”, lub nagraj własną mowę.

4

Zapisz zmiany

Kliknij **Zapisz** w prawym górnym rogu.

5

Wyjdź z trybu edycji i przetestuj kafelek

Wyjdź z trybu edycji i kliknij kafelek, aby usłyszeć wypowiedziane zdanie.

Pełna transkrypcja

▼ Przeczytaj pełną transkrypcję filmu

Witam wszystkich, jestem Rick z ExpressMe.

Dziś pokażę Wam, jak ustawić zdanie dla kafelka, aby zamiast słowa wypowiedane było zdanie.

Jeśli na przykład kliknę teraz na kafelek tak, usłyszymy następujące. Ale możemy tutaj ustawić także coś innego.

Przejdźmy do trybu edycji. Kliknij w prawym górnym rogu, a następnie powiedz: dobrze, rozpocznij edycję. I możemy kliknąć trzy kropki przy kafelku tak.

Widzimy wtedy, że jest kilka opcji. Możemy wpisać zdanie lub sami nagrać mowę. Teraz wpisz na przykład: tak, właśnie tak.

Następnie możemy po prostu zapisać w prawym górnym rogu. Gdy wyjdziemy z trybu edycji i klikniemy teraz na tak, usłyszymy następujące.

To oczywiście bardzo prosty przykład, ale można z tym robić różne rzeczy, na przykład wypowiadać własne imię lub dłuższe zdania.